

Cavite Perfect

NOVA TEHNOLOGIJA U OBLIKOVANJU TELA



Aparat Cavit perfect je zasnovan na savremenoj tehnologiji kavitacije i osigurava efektno poboljšanje telesnog izgleda.

- **Bezbolna, prijatna metoda**

Metoda uzv kavitacije predstavlja prijatnu, efektnu i uspešnu alternativu hirurškim intervencijama.

- **Terapija sa dramatičnim poboljšanjem izgleda**


Zavisno od vrste celulita i područja koje se tretira, biraju se odgovarajući programi. Oblikovanje stomaka, bedara, bokova, nadlaktice, natkolenice i gluteusa. Nakon samo jednog tretmana opseg tretiranog dela tela se smanjuje za nekoliko centimetara.

- **Delovanje i dobrobit kavitacije**

Sprovodi se na način da se područje koje se želi tretirati prelazi sondom putem koje niskofrekventni ultrazvučni talasi prodiru u područje potkožnog masnog tkiva gde dolazi do selektivnog razbijanja masnih ćelija bez da se oštećuje okolno tkivo.

Cavit perfekt deluje samo na masne ćelije, dok koža, cirkulatorni sistem, nervni i mišićni sistem ostaju netaknuti.



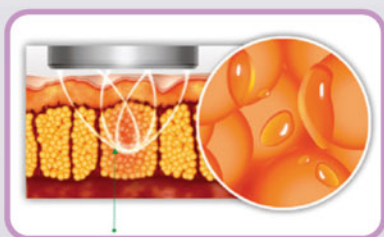

Metoda kavitacije donosi prelomnicu u problematici rešavanja celulita i prekomernih masnih naslaga na pojedinim delovima tela. Stroga dijeta, naporno i dugotrajno vežbanje i hirurška intervencija (liposukcija) do sada su bile metode kojima se nastojalo rešiti problem celulita.

Kavitacija je neinvanzivna i bezbolna terapija bez neželjenih efekata koja omogućava brz, siguran i jedinstven rezultat u oblikovanju tela.

Tehničke karakteristike:

Tip aparata:	Cavite Perfect
Šifra:	5054
Izvor energije:	piezoelektrični pretvarač
Frekvencija:	28 KHz
Izlazna snaga:	do 50 W
Vreme terapije:	do 50 min
Broj programa:	4

Mrežni napon:	220 V, 50/60 Hz
Snaga:	100 VA

Dimenzije:	580x440x11-29 mm
Težina:	12 kg

Standardna oprema:

Sonda: 1 komad
Negativna sonda: 1 komad
Kontaktni gel
Uputstvo za upotrebu



● Kako deluje kavitacija?

Kavitacija je proces koji počinje kada niskofrekventni ultrazvučni talasi mehanički "buše" membrane masnih ćelija pri čemu dolazi do oslobađanja masnoća u obliku triglicerida u međjućelijsku tečnost. Ostaci razbijenih masnih ćelija eliminišu se putem limfnog sastava i jetre. Niskofrekventni talasi su fokusirani na tačno određenoj dubini gde se vrši selektivno razbijanje potkožnih masnih ćelija (Lyses of Adipocytes) bez oštećenja okolnog tkiva.

Tretman Cavite perfectom pruža gotovo jednake rezultate kao estetski zahvat, ali bez anestezije, bolova i dugotrajnog oporavka. Posle tretmana se primenjuje limfna drenaža kako bi se razbijene masne ćelije što lakše uklonile iz organizma.



Vecom cosmetic
Trg kralja Aleksandra 2/2 18000 Niš, Srbija
tel. prodaja: ++381-18-4255-123, 4296-006
mobtel: ++381-63-77-19-787
e-mail: office@vecom.rs
www.vecom.rs